


Anleitung zur Probenentnahme Lolli-Test (PCR-Pooltestung)

Pro Pool max. 15 Tupfer sammeln.

1

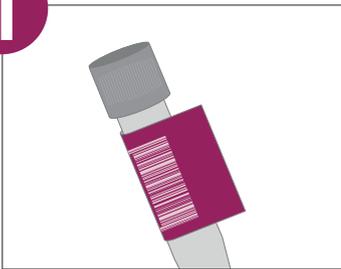


Pool-Verantwortlicher:
Pooling-Sammelröhrchen
mit Barcode-Etikett
(Auftragsnummer) bekleben.

2




Pool-Verantwortlicher:
Auftragschein ggf. mit
korrektem Barcode-Etikett
(Auftragsnummer) bekleben und vollständig ausfüllen.

3

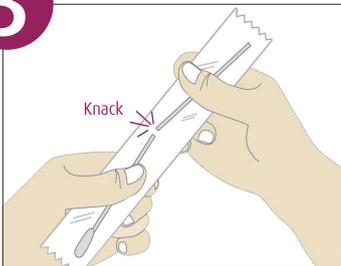

Test-Teilnehmer:
Tupfer in der Verpackung
auf Lolli-Größe (ca. 8 cm
Länge) an der Sollbruch-
stelle brechen und am Stil
entnehmen. **Dabei den
Tupfer nicht im vorderen
Bereich berühren!**

4

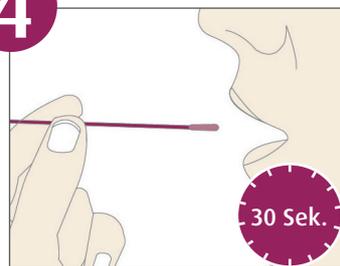

Test-Teilnehmer:
Tupfer mit der Spitze voran
im Mund für mind.
30 Sekunden lang lut-
schen. Dabei im Mund
hin und her bewegen und
nicht kauen.

5



Pool-Verantwortlicher:
Röhrchenkappe abschrauben.
Gelutschte Tupfer im Pool-
Sammelröhrchen sammeln
(jeder Testteilnehmer wirft
seinen Tupfer mit der Spitze
nach unten ein). Sammel-
röhrchen fest verschließen
und nicht wieder öffnen.

6



Pool-Verantwortlicher:
Alle Pool-Sammelröhrchen
mit innenliegenden Tupfern
und den dazugehörigen
Auftragscheinen in eine
Labor-Versandtüte geben,
fest verschließen und dem
Labor übergeben.